


Monteringsanvisning och manual för Rulledrag.



Rulledraget används tillsammans med Dragkula för Zoom

Rulledraget monteras på fotbågen på manuella rullstolar. Utformningen är gjord så det ska passa på de vanligast förekommande rullstolarna. Fotbågen ska ha 54 till 92 mm mellan rören och främre röret en diameter på max 20 mm medan bakre röret får ha max 18 mm.

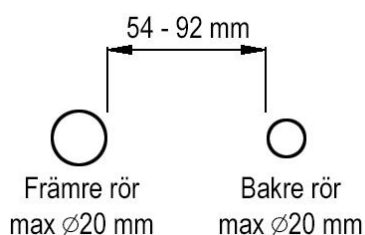

Är fotbågen utrustad med fotplatta kan man ta bort en remsa i mitten så att Rulledraget får plats.

Rulledraget får endast användas för att dra rullstolar som INTE har någon passagerare. Sitsen i rullstolen kan användas för att transportera en lättare väska eller liknande men måste då spännas fast på lämpligt sätt. Med Rulledraget monterat på rullstolen och kopplat till Dragkulan på Zoomen måste man ha ett positivt kultryck. Rulledraget ska alltså ligga kvar på kulan även om man tar bort låsbygeln över kulan.

När man kör Zoom med rullstol efter så ska man tänka på att rullstolen i vissa lägen kan välta tex. om man kör för fort på ojämnt underlag eller i skarpa kurvor. Likaså att rullstolens länkhjul kan ta i om man kör upp eller ned för en kant.

Rulledraget är dimensionerat för att tåla en belastning av 40 kg på rullstolens fotbåge. Det är dock INTE troligt att rullstolens fotbåge med infästning klarar denna belastning.

Montering:

Man för in Rulledraget i fotbågen enl. bild 1 och för in det så att främre röret i fotbågen pressas mot låsmekanismen så den öppnas varvid Rulledraget kan lyftas något så låsmekanismen låser.

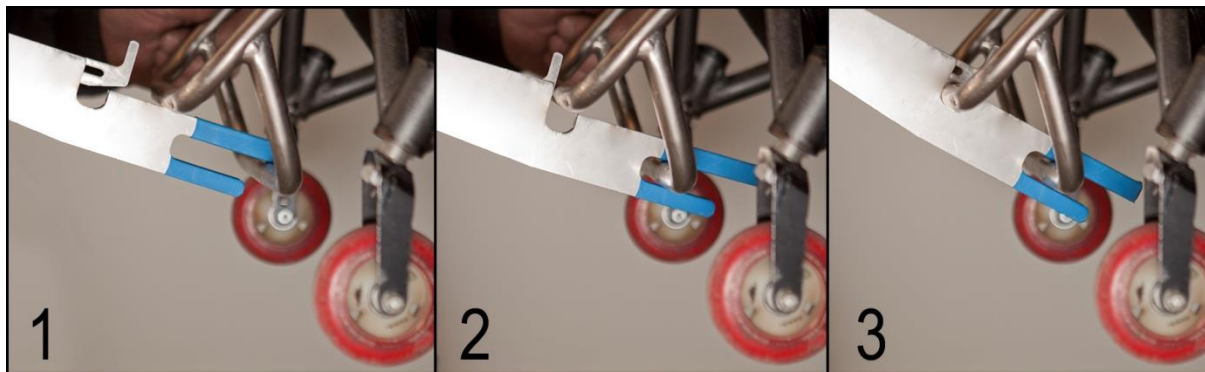


Bild 1

Rulledraget, med rullstol, kopplas nu till Dragkulan på Zoomen genom att mjukt pressa dess främre ände mot Dragkulans låsbygel, enl. bild 2. Rulledraget kommer då att glida ner på kulan och Dragkulans låsbygel fjädrar tillbaka och låser Rulledraget. Känn på Rulledraget att det sitter fast genom att mjukt rycka i det uppåt/nedåt och framåt/bakåt.

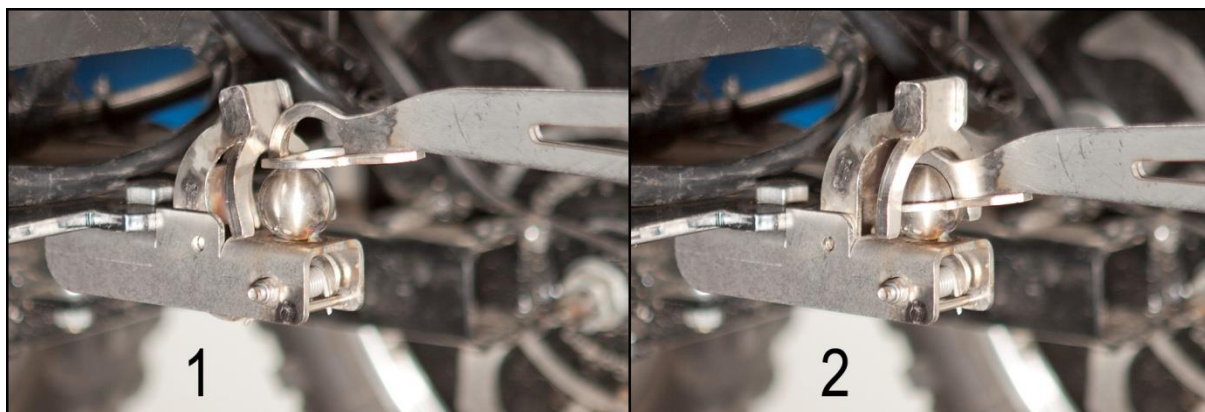


Bild 2

När man ska koppla av Rulledraget från Dragkulan trycker man in låsbygeln och lyfter Rulledraget uppåt-bakåt.

Rulledraget lossas från rullstolen genom att dra låsmekanismen framåt och då kan man vrida ner Rulledraget och därefter dra ur det ur rullstolens fotbåge.

Rulledraget är tillverkad av rostfritt stål och är därmed nästan underhållsfritt.

Vid varje tillfälle man kopplar Rulledraget till en rullstol ska man kontrollera att låsmekanismen fjädrar tillbaka efter öppning.

Efter var 20:de användning ska man kontrollera att låsmekanismen kan röra sig fram och åter utan att gå trögt eller stannar i något läge och att fjädern fungerar. Kontrollera även att Rulledraget ser helt ut och känns stabilt.

Rulledragets gafflar är inplastade med krympslang för att minska slitage på rullstolens fotbåge samt minska risken att det skramlar när man kör. Vid behov byter man dessa mot nya.

All användning av Rulledraget sker under eget omdöme och ansvar. Rullstolar finns i en mängd modeller och varianter så ingen garanti lämnas för att det fungerar problemfritt för alla olika rullstolar.

Hoppas du får mycket glädje av ditt Rulledrag.

Mikael Larsson
www.lamemicke.se